







3 cose fondamentali da ricordare

 È normale che si verifichi un aumento della salivazione quando si indossa il dispositivo, soprattutto nei primi giorni di utilizzo; se questo fenomeno si protrae per più di 10 giorni, informate il vostro specialista.

 Osservare più volte al giorno e riferire allo specialista al prossimo appuntamento:

-  La postura della lingua a riposo
-  Il rilassamento del collo & delle spalle
-  Il miglioramento della qualità del sonno

 Il dispositivo deve essere indossato OGNI giorno. Se il trattamento viene interrotto prima dello scadere dei 15 minuti, ricominciare.

Pulizia del dispositivo



Pulire il dispositivo con lo spazzolino e il dentifricio o con un collutorio senza alcol.

Asciugarlo completamente e riporlo nella sua scatola.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito:

www.froggy-mouth.it

Seguite i consigli del vostro medico curante!

Froggy-mouth è un dispositivo medico prodotto al 100% in Francia.
Non contiene lattice o ftalati ed è certificato CE e FDA.
Tutti i nostri dispositivi sono confezionati in WISE (Work Integration Social Enterprise).



FROGGY MOUTH


Correggi la funzione deglutitoria
e la postura della lingua
in 15 minuti al giorno

ISTRUZIONI PER PAZIENTI
ADOLESCENTI E ADULTI



Vi è stato prescritto un Froggymouth

Questo dispositivo corregge la funzione della deglutizione creando un nuovo schema: durante la deglutizione, i denti entrano leggermente in contatto e la lingua spinge contro il palato.

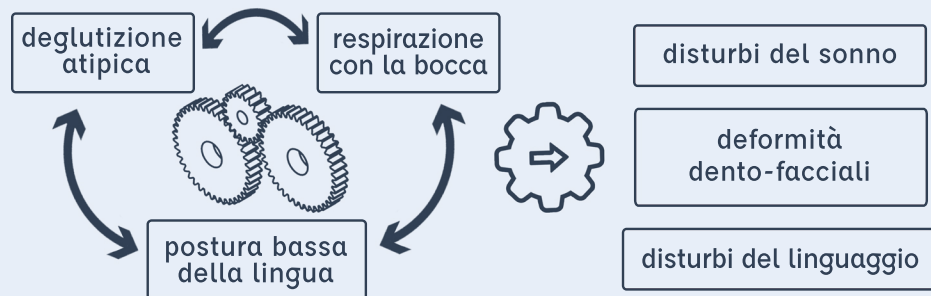

Queste condizioni cliniche hanno una cosa in comune: sono tutte legate, in modo diverso, alla postura della lingua.

Attualmente, infatti, 1/3 della popolazione soffre di disfunzioni.

Correggendo le disfunzioni della deglutizione, Froggymouth contribuisce a:

- 🕒 Abbreviare la **durata del trattamento**
- 📈 Migliorare la **qualità dei risultati**
- 🌟 Ridurre il **rischio di recidive**

Froggymouth è compatibile con tutti gli altri apparecchi ortodontici (ad esempio, i dispositivi rimovibili, apparecchi o allineatori trasparenti.)

Come funziona Froggymouth?

Froggymouth deve essere indossato per 15 minuti al giorno, davanti alla TV. Mentre il paziente indossa il dispositivo, il modello di deglutizione cambia automaticamente senza disturbare la qualità del sonno.

Seguire attentamente le **regole d'uso di Froggymouth**:



Indossarlo, una o due volte, per 15 minuti al giorno, per sviluppare in modo rapido ed efficace un nuovo modo di deglutire. La routine è essenziale.



Indossare davanti a uno schermo televisivo o a un computer. Evitare qualsiasi postura a testa china.



L'attenzione del paziente deve essere rivolta allo schermo, in modo che il nuovo modo di deglutire diventi automatico e naturale.

Come indossare Froggymouth?

